

13. SPLETNI PORTAL:

Vsaka ura pošilja podatke na spletni portal, s katerim upravlja profesionalno skrbniško osebje ali prijatelji in sorodniki.

Navodila so za prikaz na računalniku, na mobilnem telefonu so nekoliko drugačna.

KAKO DOSTOPAMO DO SPLETNEGA PORTALA?

V spletni brskalnik vpišemo slovenija.inlife-projekt.si in se z uporabniškim imenom ter geslom vpišemo v INLIFE spletni portal.

Na levi strani zgoraj se prikaže ime skrbnika, pod njim pa možnosti: »Upravljaj z uporabniki«, »Dodaj uporabnika«, »Moj profil« in »Alarmi«.

Novega uporabnika dodamo s klikom na »Dodaj uporabnika«, v prazna okna vpišemo manjkajoče podatke in potrdimo z gumbom »Dodaj uporabnika«.

Če želimo upravljati z uporabniki, na levi izberemo »Upravljaj z uporabniki«. Uporabnika, ki nas zanima, izberemo tako, da kliknemo na desni zeleni gumb:



Odprejo se okna (glej sliko 7 spodaj):

1. Splošni podatki
2. Informacija o lokaciji
3. Naprave
4. Sporočilo
5. Status aktivnosti
6. Alarmi

Splošni podatki

Janez Novak
Uporabnik

📍 Služba Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Floor 1, Apartment: 218

📅 01.01.1970

- 0 Vsi obiski
- 0 Zamujeni obiski
- 0 Opravljene naloge
- 0 Neopravljene naloge
- 0 Delno opravljene naloge


🔧 Uredi uporabnika

Naprave

Zapetnica Številka: +38651636170
⚙️

Status Aktivnosti

⚠️ Ni gibanja

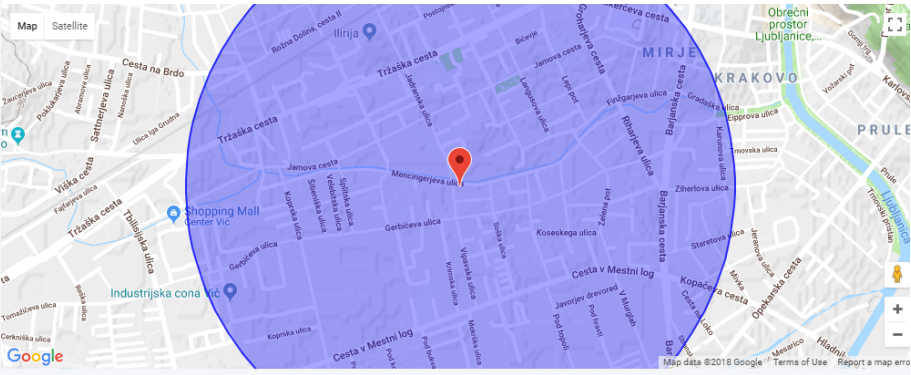

100%

Nazadnje posodobljeno
19.04.2018 04:32

Alarmi

Informacija o lokaciji Pridobi trenutno lokacijo

📍 9.4.2018 15:02
📍 5.4.2018 18:58
📍 23.3.2018 10:40
📍 23.3.2018 10:40
📍 23.3.2018 10:40
📍 23.3.2018 10:39
📍 23.3.2018 10:39
📍 23.3.2018 10:39
📍 21.3.2018 04:42



Sporočilo


Besedilo	Čas	Zadnji datum	Prebrano ob:
Pojej kosilo :)	15:12	2018-04-19	Didn't read!
Pojej oksilo 2	15:20	2018-04-20	Didn't read!

◀ ◻ 1 ▶

Moji obiski

Ni obiskov za izbrane datume...

Slika 7

1. Izpisana ime in priimek uporabnika v levem kotu zgoraj. Spodaj so: naslov, rojstni datum, obiski in naloge. S klikom na zeleni gumb spodaj lahko uredimo podatke uporabnika.
2. S klikom na desni zgornji gumb: »Pridobi trenutno lokacijo« pridobimo lokacijo ure in s tem ugotovimo, kje se uporabnik nahaja. Pri tem upoštevajmo, da je lociranje znotraj stavb včasih netočno, zunaj stavb pa deluje nemoteno.
3. Na levi strani okna je zapisana številka ure. Na desni strani okna je ikona Če  kliknemo nanjo, se odprejo »Nastavitve naprave«. Na vrhu v oknu »Trenutne nastavitve naprave« lahko vidimo, kako je ura trenutno nastavljena. Te nastavitve ure lahko spremenimo v oknu pod njim: »Nastavi napravo na daljavo«.

Opomba: Za potrditev sprememb kliknemo gumb




V tem oknu najdemo: a)»Nastavitve za opozorila«, b)»Nastavitve za avtomatske klice«, c)»Jezik na napravi«, d)»Način komunikacije«, e)»Nastavitve peskovnika«, f)»Nastavitve opomnikov«

a) Nastavitve za opozorila

Tako lahko dostopamo do okna »Opozorila« in na daljavo spremenimo nastavitve ure. Za potrditev sprememb kliknemo zeleni gumb »Pošlji«.

b) Nastavitve za avtomatske klice

V okna dodamo ali spremenimo kontakte: vpišemo ime, telefonsko številko in vključimo/izključimo prejemanje sms-ov in klicev. Kontakt lahko tudi prestavimo na drugo mesto v tabeli tako, da se postavimo na puščico gor-dol pred kontaktom, kliknemo nanjo in  kontakt 'nesemo' na drugo mesto.

c) Jezik na napravi


Izbiramo lahko med slovenščino in angleščino. Za potrditev kliknemo na gumb »Pošlji«.

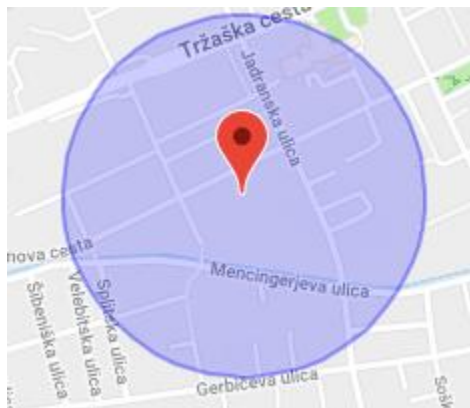
d) Način komunikacije

Izbirate lahko med sms-om ali internetom.

e) Nastavitve peskovnika

Opozorilo: Ta funkcija skrajša čas baterije.

Peskovnik nastavimo tako, da z miško 'primemo' rdečo ikono , ki označuje lokacijo in jo postavimo na željeno mesto. Lokacijo lahko spremenimo tudi tako, da jo vpišemo v okno »Lokacija«. Nato vpišemo željeni radij, na katerem naj se uporabnik giblje. Tako smo nastavili določeno območje oz. peskovnik, ki se obarva z modro barvo (glej sliko 8 spodaj). Izberemo še časovno obdobje, v katerem bo funkcija peskovnika vključena. Če bo uporabnik v tem času prišel izven določenega območja (peskovnika), bo ura obvestila skrbnika.



Slika 8

f) Nastavitve opomnikov

Vpišete sporočilo, ki naj se izpiše na uri, nastavite uro ter datum (do vključno katerega dne naj ura pošilja opomnike).

4. V tem oknu vidimo opomnike, ki so bili prikazani na uri. Če uporabnik vidi opomnik in ga potrdi v kratkem času, potem se na spletnem portalu obarva zeleno. Če malo zamudi, se obarva rumeno, če pa opomnika ne vidi in ga ne potrdi, se obarva rdeče.
5. V tem oknu je na levi strani vidno zaznavanje aktivnosti, na desni strani pa je vidno stanje baterije.
6. V tem oknu so vidni vsi alarmi, ki so bili sproženi na uri. V oknu so štirje stolpci: Dogodek (pove, zakaj je bil sprožen alarm), Uporabnik, Čas in Komentar.

Želimo Vam prijetno uporabo varnostne pametne ure!